

ブルズ  
**Bulls**  
クネット  
**Qunetto**

波形手すり クネット “楓”

## やさしくなれるカタチ、木の肌触り

人間の手の動きや角度を追求して生まれた波形手すり「ブルズクネット」。

立ち上がる、座るといった動作をしっかりとサポートします。

材質にはメイプル材（楓）を採用。

自然の木が持つ温かい風合いが手に優しくフィットします。

介護保険  
改修

35φ

トイレ用波形手すり【ブルズクネット】

介護保険適用商品

**Bulls-Qunetto**

品番：Bulls Qunetto-KA

品名：ブルズクネット “楓”

材質：手すり本体/メイプル集成材

取付部材/亜鉛合金 ABS樹脂

サイズ：径35mm 全長850mm

カラー：手すり本体/ナチュラル

取付部材/シルバー色

価格：23,000円（税込 24,150円）




優しくて高級感のある  
木の肌触り


**Bulls-Qunetto**

ジャパン建材株式会社 <http://www.jkenzai.co.jp/>

# Bulls-Qunetto 商品・施工説明書

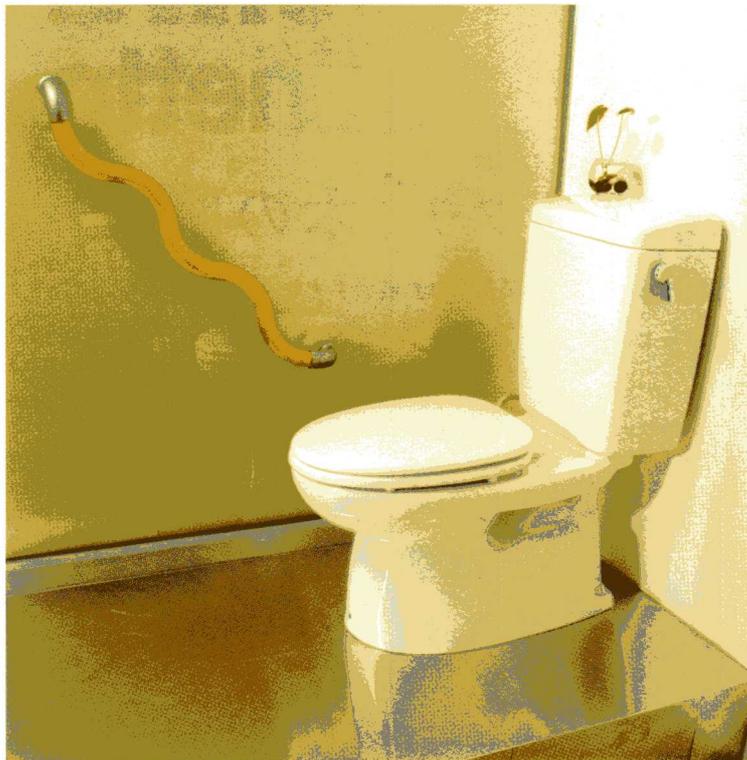

## 商品説明


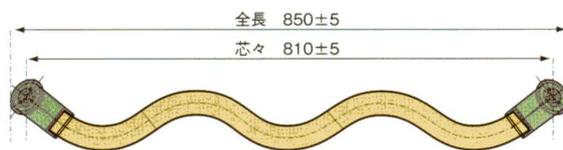


### ■標準取付位置



## 施工説明


### ■取り付け方

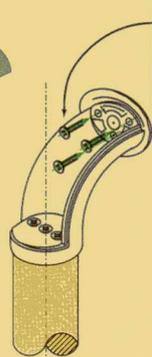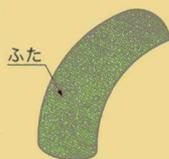

取付け専用ビスはこの中に入れてあります。尚フタを開ける際は⊖ドライバーの先を使って傷つけないように開けて下さい。

※本商品はエンドブラケット取付済です。

### ■取付下地

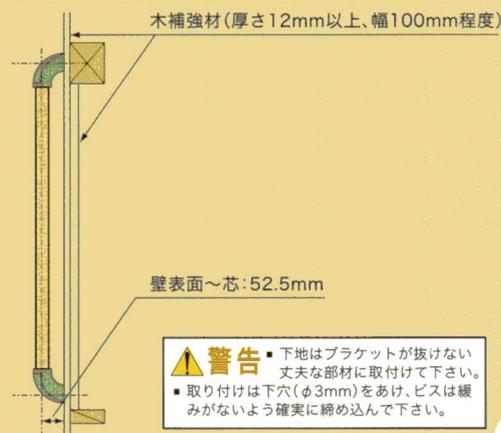

**警告** 下地はブラケットが抜けない丈夫な部材に取付けて下さい。  
■取付けは下穴(φ3mm)をあけ、ビスは緩みがないよう確実に締め込んで下さい。

## 安全上の注意

### ▲ 警告

- 壁面への取り付けは、躯体に合ったネジを準備し、堅固に締め込んでください。
- 金具を取り付ける壁面は必ず厚さ12mm以上の下地合板、幕板などによる補強をしてください。
- 取付部の下地は、アンカー等が充分効く下地にしてください。石膏ボードや薄い合板等が下地の場合は必ず補強を入れてください。補強が入っていない場合は、取付けられませんので注意してください。

### ▲ 注意

- 本製品は室内専用です。浴室など極端に湿度の高い場所、常に水がかかるような場所にはご使用いただけません。

### ▲ 注意 (取り付け位置の注意)

- 本製品は、斜め付けすることで動作補助機能による効果を求めています。上記は平均的な位置であり、利用者の個人差や取り付け箇所の状態に合わせて設置してください。
- 本製品の取り付けは、専門の施工業者に取り付け設置をご依頼ください。
- 取り付け下地は、厚さ12mm以上の下地等に確実に取り付けビスを締め込んでください。

### 【問い合わせ先】

## ジャパン建材株式会社

〒136-8405 東京都江東区新木場1丁目7番22号 新木場タワー

TEL.03-5534-3716 FAX.03-5534-3856

ホームページ: <http://www.jkenzai.co.jp/>

### 【製造・販売元】

株式会社クネット・ジャパン